

Cadeiras de Banho



- Limpeza geral, utilizar pano úmido e macio; se necessário utilize sabão neutro ou álcool para assepsia;
- Consulte o Revendedor sobre a tolerância de peso que o equipamento suporta;
- Verifique periodicamente o desgaste das rodas, da lona do encosto e do assento sanitário;
- Não deixe acumular sujeiras tais como barbantes e fios em geral entre o eixo e as rodas para evitar travamento das mesmas;
- Secar ao sol periodicamente;
- Verifique e se necessário reajuste os parafusos das articulações;
- Ao terminar o banho seque o equipamento com um pano macio;
- Lubrifique periodicamente com óleo desengripante/anticorrosivo os parafusos e rolamentos das rodas;