

Cadeiras de rodas com fechamento em X



- Limpeza geral, utilizar pano úmido e macio; se necessário utilize sabão neutro;
- Consulte o Revendedor sobre a tolerância de peso que o equipamento suporta;
- Verifique periodicamente o desgaste das rodas e da lona do encosto e assento;
- Não deixe acumular sujeiras tais como barbantes e fios em geral entre o eixo e as rodas para evitar travamento das mesmas;
- Lubrifique periodicamente com óleo desengripante/anticorrosivo os parafusos, rolamentos e eixo das rodas e do chassi;
- Verifique e se necessário reajuste os parafusos das articulações do quadro, dos apoios de pés e braços, eixos e dos freios;