

Carrinho com Tilt



- Limpeza geral, utilizar pano úmido e macio; se necessário utilize sabão neutro; Para limpeza do estofamento, se necessário sabão neutro, secar ao sol logo após a limpeza;
- Consulte o Revendedor sobre a tolerância de peso que o equipamento suporta;
- Verifique periodicamente o desgaste das rodas e do assento e encosto;
- Não deixe acumular sujeiras tais como barbantes e fios em geral entre o eixo e as rodas para evitar travamento das mesmas;
- Lubrifique periodicamente com óleo desengripante/anticorrosivo os parafusos, rolamentos e eixo das rodas e do chassi;
- Verifique e se necessário reajuste os parafusos das articulações do quadro, dos apoios de pés e braços, eixos e dos freios;
- Quando possui adaptações posturais, verificar o desgaste dos tecidos de revestimentos e as espumas de conforto;
- As adaptações são aconselhadas a tomarem sol periodicamente;
- Pode ser utilizado álcool na assepsia dos cintos e adequações posturais;
- Nunca lavar as adaptações, pois as mesmas possuem madeira por dentro do revestimento automotivo para estabilização das espumas, fixação dos cintos e grapas;
- Verifique com periodicidade o funcionamento adequado do pistão de modificação de postura da cadeira (Tilt).