

Parapodium Versátil



- Limpeza geral, utilizar pano úmido e macio; se necessário utilize sabão neutro ou assepsia com álcool;
- Consulte o Revendedor sobre a tolerância de peso que o equipamento suporta;
- Lubrifique periodicamente com óleo desengripante/anticorrosivo os parafusos, rolamentos e eixo das rodas e do chassi;
- Não deixe acumular sujeiras tais como barbantes e fios em geral entre o eixo e as rodas para evitar travamento das mesmas;
- A mesa pode ser limpa com pano úmido ou assepsia com álcool;
- Verifique e se necessário reajuste os parafusos das articulações do quadro, dos apoios de pés, quadril e tronco;
- Verifique com periodicidade o funcionamento adequado do pistão de modificação de inclinação do equipamento.